



NAVODILA ZA UPORABO

Ta letak z navodili za uporabo in nego leč je namenjen uporabnikom hidrofilnih mehkih kontaktnih leč Bausch + Lomb daily disposable.

Velja za:

IME IZDELKA	MATERIAL	VSEBNOST VODE	RAZTOPINA V EMBALAŽI
Obarvane kontaktne leče SoftLens® daily disposable (hilaflicon B)	Hilaflicon B	59 % teže	Raztopina boratnega pufra s poloksaminom
Torčne obarvane kontaktne leče SoftLens® daily disposable (hilaflicon B)			
Kozmetične barvne kontaktne leče Naturelle™ daily disposable (hilaflicon B)			
Obarvane kontaktne leče Biotrue® ONEday (nesoflicon A)	Nesoflicon A	78 % teže	Raztopina boratnega pufra s poloksaminom
Biotrue® ONEday obarvane kontaktne leče za presbiopijo (nesoflicon A)			

Indikacije

Kontaktne leče Bausch + Lomb (hilaflicon B in nesoflicon A) so namenjene vsakodnevni uporabi za korekcijo refraktivne ametropije (kratkovidnost, daljnovidnost, astigmatizem), presbiopije in za zmanjšanje sferne aberacije, pri afakičnih in/ali osebah brez afakije z zdravimi očmi in refraktivnim astigmatizmom do dioptrije 2,00 (pri dnevnih torčnih lečah za enkratno uporabo SoftLens® do dioptrije 5,00), ki ne vpliva na ostrino vida. Leče so zasnovane za enkratno uporabo pri sferni dioptriji od +20,00 D do -20,00 D, zato jih je treba po vsaki odstranitvi iz očesa zavreči.

Opis in uporaba

Leče so zasnovane za enkratno uporabo, zato jih je treba po uporabi zavreči. Ponovna uporaba brez čiščenja in razkuženja leč lahko povzroči vnetje in/ali resne poškodbe oči. Vselej upoštevajte navodila okulista glede priporočenega obdobja uporabe.

STERILE Leče so sterilne. Proizvajalec priporoča največ enodnevno uporabo. Razkužene so bile s paro.

Leč NE UPORABLJATE, če je embalaža poškodovana ali odprta.

Navodila za vstavljanje in odstranjevanje

Pred rokovanjem z lečami si vselej temeljito operite in osušite roke, pri čemer ne uporabljajte odlišavljenih ali medicinskih mil. Lečo položite na dlan. Prepričajte se, da je pravilno obrnjena.



Preden vstavite lečo v oko, jo pregledajte in je ne vstavljajte, če je opraskana ali poškodovana.

Pred odstranitvijo leče se prepričajte, da imate čiste in suhe roke, nato pa s prstom povlecite lečo na beločnico ter jo odstranite. Če leče ne morete odstraniti, uporabite kapljice za vlaženje oči. Po odstranitvi leče iz očesa to vselej zavrzite.

Nega leč

- Pred rokovanjem z lečami si vselej umijte in sperite roke.
- Pazite, da kozmetični izdelki, losjoni, mila, kreme ali odlišavljene snovi ne pridejo v stik z očmi ali lečami.
- Za odstranjevanje leč iz embalaže ali oči ne uporabljajte ostrih predmetov ali nohtov.
- Po odstranitvi leč te vselej zavrzite.

Opozorila in previdnostni ukrepi

Neupoštevanje časa uporabe leč in načina nege, ki vam ju je priporočil okulist, lahko povzroči nevarnost resne okužbe oči.

Dnevnih leč za enkratno uporabo ne uporabljajte med spanjem ali dlje kot en dan.

Kontaktnih leč ne uporabljajte v naslednjih primerih:

- alergija, vnetje, okužba ali rdečina v očesu ali okoli njega;
- suhe oči (nezadostno solzenje);
- bolezensko stanje, ki vpliva na oči, npr. prehlad ali gripa;
- kakršna koli sistemska bolezen, ki vpliva na oči.

V naslednjih primerih se pred uporabo kontaktnih leč posvetujte z okulistom:

- ukvarjanje z vodnimi športi;
- zelo suho ali prašno okolje;
- uporaba zdravil za oči.

V primeru naslednjih težav nemudoma odstranite leče:

- zbadanje v očeh, pekoče, srbeče ali razdražene oči ali druge bolečine v očeh;
- zmanjšano udobje v primerjavi z uporabo leč v preteklosti;
- nenavaden izcedek ali prekomerno solzenje oči;
- rdečina v očeh;
- izjemno ali nenehno suhe oči;
- zmanjšan ali zamegljen vid;
- mavrični vid ali bleščanje v bližini luči;
- preobčutljivost na svetlobo.

Če kateri od navedenih znakov ne izveni niti, ko odstranite leče in vstavite nove, te odstranite in se posvetujte z okulistom. Če znakov ne upoštevate, lahko ti privedejo do resnejših bolezenskih stanj.

Dodatna opozorila in previdnostni ukrepi za barvne kontaktne leče Biotrue ONEday (nesoflicon A)

Opozorilo: Kontaktne leče, ki absorbirajo UV-svetlobo, NE nadomeščajo zaščite za oči, ki absorbira UV-svetlobo, kot so zaščitna ali sončna očala, ki absorbirajo UV-svetlobo, saj ne pokrijejo vaših oči in območja okoli oči v celoti. Nadaljujte z uporabo zaščitnih očal, ki absorbirajo UV-svetlobo, skladno z navodili.

Opomba: Dolgotrajna izpostavljenost UV-sevanju je eden od dejavnikov tveganja, povezanih z nastankom sive mrene. Izpostavljenost temelji na številnih dejavnikih, kot so razmere okolice (nadmorska višina, geografska lega, oblačnost) in osebni dejavniki (pogostost in vrsta dejavnosti na prostem). Kontaktne leče, ki blokirajo UV-svetlobo, pomagajo zagotavljati zaščito proti škodljivemu UV-sevanju.

Opomba: Učinkovitost kontaktnih leč, ki absorbirajo UV-svetlobo, pri preprečevanju ali zmanjševanju očesnih bolezni, povezanih z izpostavljenostjo UV-svetlobi, se trenutno ni potrjena. Prav tako se niso bile opravljene klinične raziskave, ki bi dokazale, da uporaba kontaktnih leč, ki absorbirajo UV-svetlobo, zmanjšuje tveganje za razvoj sive mrene in drugih očesnih bolezni. Za več informacij se posvetujte s svojim okulistom.

Referenčni vodnik za simbole na nalepkah in škatlah



Plačana pristojbina za ravnanje z odpadki skladno z direktivo 94/62/ES



Bausch + Lomb Incorporated
Rochester NY 14609, USA



Bausch + Lomb Incorporated
106 London Road
Kingston-upon-Thames KT2 6TN, UK

Datum izdaje: DD. MM. LLLL



Označuje oznako o skladnosti CE in številko pripravljenega organa



Samo za enkratno uporabo



Temperaturne omejitve

Znak ®/™ označuje blagovno znamko podjetja Bausch + Lomb Incorporated.
© Bausch + Lomb Incorporated.