



NAVODILA ZA UPORABO

Ta letak z navodili za uporabo in nego leč je namenjen uporabnikom hidrofilnih mehkih kontaktnih leč Bausch + Lomb (balaflicon A).

Velja za:

IME IZDELKA	MATERIAL	VSEBNOST VODE	RAZTOPINA V EMBALAŽI
Barvne kontaktne leče PureVision® (balaflicon A)	balaflicon A	36 % teže	Raztopina boratnega pufra
Torične barvne kontaktne leče PureVision® (balaflicon A)			
Multifokalne barvne kontaktne leče PureVision® (balaflicon A)			
Barvne kontaktne leče PureVision® 2 (balaflicon A)	balaflicon A	36 % teže	Raztopina boratnega pufra s poloksaminom
Barvne kontaktne leče PureVision® 2 (balaflicon A) za astigmatizem			
Barvne kontaktne leče PureVision® 2 (balaflicon A) za starostno slabovidnost			

Opis in uporaba

Te leče so namenjene vsakodnevni uporabi. Glede priporočenega obdobja uporabe upoštevajte navodila okulista. Lahko jih uporabljate kot leče za enkratno uporabo, ki jih po uporabi zavrzete, ali pa jih neprekinjeno nosite daljše obdobje od 1 do 30 dni, vendar glede priporočenega obdobja uporabe upoštevajte navodila okulista. Ob ponovni uporabi leče očistite, sperite in razkužite, preden jih znova vstavite.

Kontaktne leče Bausch + Lomb (balaflicon A) lahko uporabljate tudi za terapevtske namene, in sicer za zdravljenje bolezni roženicega epitelija. Glede priporočenega obdobja uporabe vselej upoštevajte navodila okulista.

STERILE ! Leče so ob dobavi sterilne in so namenjene večkratni uporabi, vendar glede priporočenega obdobja uporabe upoštevajte navodila okulista. Razkužene so bile s paro. Leč NE UPORABLJAJTE, če je embalaža poškodovana ali odprta.

Navodila za vstavljanje in odstranjevanje

Pred rokovanjem z lečami si vselej temeljito operite in osušite roke, pri čemer ne uporabljajte odvisljenih ali medicinskih mil. Lečo položite na dlan. Prepričajte se, da je pravilno obrnjena.



Preden vstavite lečo v oko, jo pregledajte in je ne vstavljajte, če je opraskana ali poškodovana.

Pred odstranitvijo leče se prepričajte, da imate čiste in suhe roke, nato pa s prstom pomaknite lečo na beločnico ter jo odstranite. Če leče ne morete odstraniti, uporabite kapljice za vlaženje oči.

Nega leč

- Čiščenje in razkuževanje leč med posameznimi nošenji sta bistvenega za zdrave oči.
- Uporabljajte samo izdelke za nego mehkih kontaktnih leč skladno s priporočili proizvajalca.
- Vselej uporabljajte izdelke za nego leč z veljavnim rokom uporabnosti.
- Za spiranje, shranjevanje ali ponovno vlaženje leč ne uporabljajte vode iz pipe, ustekleničene vode ali sline.
- Ko leč ne nosite, morajo biti te povsem potopljene v priporočeni raztopini.
- Pri čiščenju leč ne pozabite očistiti še posodice za leče.
- Po izteku časa uporabe leč, ki vam ga je priporočil okulist, leče vselej zavrzite.
- Preden rokušete z lečami, si vselej umijte in sperite roke.
- Pazite, da kozmetični izdelki, losjoni, mila, kreme ali odšavljene snovi ne pridejo v stik z očmi ali lečami.
- Leč iz embalaže ali oči ne odstranjujte z ostrimi predmeti ali nohti.

Opozorila in previdnostni ukrepi

Neupoštevanje časa uporabe leč in načina nege, ki vam ju je priporočil okulist, lahko povzroči nevarnost resne okužbe oči.

Dnevni leč za enkratno uporabo ne uporabljajte med spanjem ali dlje kot en dan.

Kontaktnih leč ne uporabljajte v naslednjih primerih:

- alergija, vnetje, okužba ali rdečina v očesu ali okoli njega;
- suhe oči (nezadostno solzenje);
- bolezensko stanje, ki vpliva na oči, npr. prehlad ali gripa;
- kakršna koli sistemska bolezen, ki vpliva na oči.

V naslednjih primerih se pred uporabo kontaktnih leč posvetujte z okulistom:

- ukvarjanje z vodnimi športi;
- zelo suho ali prašno okolje;
- uporaba zdravil za oči.

V primeru naslednjih težav nemudoma odstranite leče:

- zbadanje v očeh, pekoče, srbeče ali razdražene oči ali druge bolečine v očeh;
- zmanjšano udobje v primerjavi z uporabo leč v preteklosti;
- nenavaden izcedek ali prekomerno solzenje oči;
- rdečina v očeh;
- izjemno ali nenehno suhe oči;
- zmanjšan ali zamegljen vid;
- mavrični vid ali bleščanje v bližini luči;
- preobčutljivost na svetlobo.

Če kateri od navedenih znakov ne izveni niti, ko odstranite leče in vstavite nove, te odstranite in se posvetujte z okulistom. Če znakov ne upoštevate, lahko ti privedejo do resnejših bolezenskih stanj.

Previdnostni ukrepi

Za čiščenje in razkuževanje kontaktnih leč Bausch + Lomb (balaflicon A) ne uporabljajte sistema za razkuževanje Allergan Ultracare ali katerega koli od njegovih sestavnih delov (raztopina za razkuževanje Oxysept Ultracare, tablete za nevtralizacijo Oxysept in čistilo na osnovi encimov Ultrazyme), ker se bodo mere leč spremenile.

Referenčni vodnik za simbole na nalepkah in škatlah



Plačana pristojbina za ravnanje z odpadki skladno z direktivo 94/62/ES



Bausch & Lomb Incorporated
1400 North Goodman Street
Rochester NY 14609, USA



Bausch & Lomb Incorporated
106 London Road
Kingston-upon-Thames KT2 6TN, UK

Datum izdaje: DD. MM. LLLL



Označuje oznako o skladnosti CE in številko priglasenega organa



Temperaturne omejitve

Znak ®/™ označuje blagovno znamko podjetja Bausch & Lomb Incorporated.

© Bausch & Lomb Incorporated.

Drugi izdelki/blagovne znamke so last njihovih lastnikov.

8100401